

# Perfect Fits

In-Ear-Monitoring



Reiner Schneider  
Zur Keuchinger Flur 33  
66693 Mettlach

Tel.: +46 151 28071379

Mail: [perfectfits.info@gmail.com](mailto:perfectfits.info@gmail.com)

[www.perfectfits.de](http://www.perfectfits.de)

## Hinweisformular zum Anfertigen einer Otoplastik

Besonderheiten bei der Abdrucknahme für In-Ear Ohrhörer & Otoplastiken

Sehr geehrter Hörgeräteakustiker,

zum Anfertigen eines In-Ear-Systems benötige ich eine Ohrabformung.

- Bitte verwenden Sie keine dünnfließenden Abdruckmassen, sondern solche mit leicht druckaufbauender Konsistenz.
- Der Abdruck sollte unbedingt bis kurz hinter den zweiten Knick des Gehörgangs gehen. Auch die Concha samt Cymba muss komplett abgebildet sein.
- Bitte den Abdruck keinesfalls beschneiden oder anderweitig bearbeiten.
- Bei Fehlstellen im Abdichtungsbereich oder an den Haltezonen bitte die Abformung wiederholen.
- Der Mund sollte leicht geöffnet sein, am besten ist die Verwendung eines Beißblocks. Während des Abdrucks keine Kaubewegungen machen.
- Wenn Ihnen bei der Abdrucknahme Besonderheiten aufgefallen sind, teilen Sie uns dies bitte mit.

**Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit!**